

NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation. Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus. Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels: <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

LES INFORMATIONS TECHNIQUES:

- Fabrication de masque respectant la norme AFNOR SPEC S76-001:2020
- Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020 »
- Couche interne non-tissée polypropylène 70g/m², matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-6234/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1) et qui supporte 10 lavages (rapport RP/RP 20-2972/DGA MNRBC/NP). Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%. Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-18
- Doublure 100% polyester tissé, 130g/m². Impression en sublimation sur la face extérieure, encres eco-solvant Mimaki certifiées ECO PASSPORT par OEKO-TEX.
- Testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.



COMMENT PORTER LE MASQUE?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

01. Tenez le masque par les lanières élastiques.
02. Placez-le au niveau de votre bouche.
03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :

05. Évitez de le toucher et de le déplacer.
06. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

13. Quand vous avez porté le masque 4h.
14. Quand vous souhaitez boire ou manger.
15. Quand il devient difficile de respirer.
16. Si le masque s'humidifie.
17. Si le masque est endommagé.
18. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

11. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
12. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
13. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
14. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
15. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE?

Pour le lavage :

01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
03. Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie à 100%.
04. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :

09. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
10. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
11. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
12. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).